

大安聯合醫事檢驗所公告

公告編碼：441

日期：113年12月18日

公告事項：1. 檢驗項目Electrophoresis：Protein，Protein EP，Serum 蛋白電泳分析 更換試劑及參考區間

1. 113年12月23日起，檢驗項目Electrophoresis：Protein，Protein EP，Serum 血清蛋白電泳分析更換試劑及參考區間，說明如下：

檢驗項目：Electrophoresis：Protein，Protein EP，Serum

健保編號：09065B 蛋白電泳分析

檢體採集：血清0.3mL(或全血1.5mL)，不可使用血漿檢體，不須空腹。

保存方式：2~8°C，血清檢體應避免溶血。

檢體退件：溶血4+(會造成alpha2和beta fraction異常偏高)；錯誤的血漿檢體(EDTA、NaF、Citrate)；檢體少於0.3ml；不可使用Plasma(Fibrinogen會在beta和gamma之間出現明顯Band)；解凍完再次冷凍的檢體(避免檢體成份變性)

分析方法：Electrophoresis，SPIFE Touch，Helena

參考區間：

項目	原參考區間	新參考區間
Albumin	54.0-60.3 %	47.0-61.6%
Alpha 1	1.8-4.0 %	2.0-4.4%
Alpha 2	7.6-10.9 %	8.9-14.9%
Beta	11.4-16.1 %	10.8-16.2%
Gamma	13.4-20.7 %	9.8-24.4%

(2022年版檢驗目錄p.171)

謹此敬告週知修正，通知事項同步公告於本所網頁

陳明輝



大安聯合醫事檢驗所
負責人 陳明輝 敬上